

qTest

AN EASY WAY TO FIND ANSWERS

qTest



Equilibrium Test của Project V Nâng tầm sức khỏe với phương pháp đột phá

Bộ xét nghiệm qTest đã ra đời trong sự hợp tác uy tín giữa chúng tôi và giáo sư Torello Lotti, trưởng khoa Da liễu và Hoa liễu tại Đại học Guglielmo Marconi, Rome, Viện sĩ Viện Hàn lâm Cộng hòa Italy. Bộ xét nghiệm này sẽ giúp bạn xác định nhanh chóng và dễ dàng những gì cơ thể bạn đang cần tại thời điểm hiện tại. Giáo sư Lotti đã phát triển một phương pháp độc đáo bằng cách kết hợp hai công cụ xét nghiệm khác nhau, dựa trên việc xác định mức độ oxy hóa của cơ thể và độ pH của nước bọt, là một chỉ số sinh học chẩn đoán phổ quát.

REDOX là gì?

REDOX là thuật ngữ viết tắt của "Reduction-Oxidation" (phản ứng oxy hóa khử). Sự cân bằng của phản ứng này chính là một cơ chế sinh học cơ bản và liên hồi của mọi tế bào trong cơ thể giúp duy trì tình trạng khỏe mạnh. Việc mất cân bằng nguy hiểm nhất có thể xảy ra là tình trạng OXY HOÁ quá mức, không được bù đắp đầy đủ bởi phản ứng khử.

pH là gì?

Ký hiệu pH được sử dụng để mô tả mức độ axit và bazơ của một chất. pH = 14 là độ bazơ mạnh nhất, trong khi pH = 0 là độ axit mạnh nhất. Giữa thang đo là pH = 7, đây là độ pH của nước tinh khiết. Cà phê đen và giấm ăn, ví dụ, có tính axit, với độ pH < 7. Nước biển và thuốc trung hòa axit có tính bazơ, với độ pH > 7.

Máu của người khỏe mạnh có tính kiềm nhẹ, với giá trị lớn hơn 7 một chút. Độ pH bình thường của nước bọt là từ 6,2 đến 7,6.

qTest hoạt động như thế nào?

Công cụ xét nghiệm của chúng tôi phản ứng với quá trình oxy hóa khử (viết tắt là redox), kết hợp với độ pH của nước bọt, từ đó xác định tình trạng sức khỏe của từng cá nhân.

Tại sao sự cân bằng giữa mức độ oxy hóa và độ pH lại quan trọng?

Cân bằng oxy hóa khử

Các phản ứng oxy hóa khử (redox) đóng vai trò then chốt trong nhiều quá trình sinh học thiết yếu, giúp cơ thể chúng ta hoạt động trơn tru. Năng lượng sinh học được lưu trữ và giải phóng thông qua các phản ứng này. Ví dụ, quá trình quang hợp sử dụng ánh sáng để khử carbon dioxide thành đường và oxy hóa nước thành oxy phân tử. Ngược lại, quá trình hô hấp giúp oxy hóa đường để tạo ra năng lượng, đồng thời thải ra carbon dioxide và nước.

Mất cân bằng oxy hóa khử

Trong vô số quá trình phức tạp điều tiết hoạt động của cơ thể, có sự tồn tại của các chất khiến những quá trình này bị rối loạn. Thông thường, quá trình oxy hóa khử (redox) được duy trì ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, với những loại bệnh thoái hóa thần kinh khác nhau, phản ứng redox này sẽ bị phá vỡ, dẫn đến sự hình thành các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Mặc dù yếu tố di truyền là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tổng thể khả năng oxy hóa khử của tế bào não bộ, nhưng sự xuất hiện của:

- * Xenobiotic (chất độc ngoại sinh)
- * Quá trình viêm (tổn thương)
- * Rối loạn chuyển hóa (stress oxy hóa)

góp phần gây ra các rối loạn não bộ, ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Oxy hóa tương đương với "sự gỉ sét"

Tế bào bị oxy hóa sẽ già đi nhanh hơn và dễ mắc các bệnh về thoái hóa. Thiếu oxy, sốc và nhiễm trùng huyết là những trường hợp khiến tế bào bị oxy hóa kéo dài, dẫn đến mất cân bằng Redox. Xét nghiệm nước bọt bằng qTest có thể giúp phát hiện những vấn đề này. Quá trình oxy hóa do enzyme xúc tác trong hoa quả và rau củ là một thí dụ. Mất cân bằng Redox chính là lý do khiến hoa quả và rau củ bị hỏng. Nhiễm trùng thông thường cũng dễ xảy ra hơn sau khi tế bào bị oxy hóa.

Sử dụng chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn chặn gỉ sét do enzyme và những tác hại đi kèm

Tương tự, các tế bào của con người cũng phản ứng với quá trình oxy hóa do enzyme. Quá trình này có thể được ngăn ngừa bằng việc bổ sung chất chống oxy hóa thích hợp. Do đó, việc duy trì mức cân bằng pH và trạng thái oxy hóa khử (REDOX) là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể.

Nhờ cách tiếp cận đổi mới, chúng tôi sẽ đề xuất các loại chất adaptogen thích hợp cho cơ thể dựa trên kết quả thu thập được. Liệu trình sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm pH-REDOX được lặp lại định kỳ.

Mối liên hệ giữa mức pH và mức Redox

Độ pH cao trong cơ thể có thể do nhiều yếu tố gây ra. Ngay cả những người có vẻ ngoài khỏe mạnh và/hoặc không có bệnh lý cũng cần duy trì mức pH bình thường. Trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến độ pH tăng cao, ung thư là nguyên nhân được biết đến nhiều nhất. Tế bào ung thư sản sinh ra nhiều CO₂ và axit lactic, làm tăng độ pH trong cơ thể.

Giảm mức pH cao là bước đầu tiên để phòng ngừa ung thư.

Điều tương tự cũng xảy ra với các hội chứng chuyển hóa thường gặp ở người thừa cân, béo phì và ít vận động. Kiểm tra nước bọt bằng qTest có thể giúp theo dõi tình trạng của REDOX.

Bí quyết giữ gìn sức khỏe cho cơ thể

Nước bọt có độ pH cân bằng (từ 6,2 đến 7,6) giúp hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh

Miếng thử giúp bạn kiểm tra nhanh độ pH nước bọt. Bạn có thể thay đổi một số thói quen sinh hoạt để duy trì mức pH cân bằng. Bảng qMatrix sử dụng các ô màu để hiển thị các yếu tố sức khỏe đang thiếu cho các giá trị pH khác nhau. Nhờ đó, dựa trên tình trạng axit - bazơ của cơ thể, bạn có thể dễ dàng xác định được những chất nào sẽ giúp bạn đạt được sức khỏe tốt nhất, kết hợp với mức Redox đã đạt được.

Những quá trình và sản phẩm nào có thể giúp hệ thống cân bằng và ổn định?

Project V áp dụng sức mạnh trị liệu từ thiên nhiên, những nghiên cứu mới nhất và công nghệ đột phá để tạo nên các sản phẩm có tác dụng cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống hàng ngày, giúp bạn lấy lại và duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Chúng tôi sử dụng công nghệ nghiền lạnh để có được lượng thành phần hoạt tính tối đa cho từng sản phẩm. Kết hợp với quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Project V giữ nguyên vẹn tất cả các yếu tố có lợi từ thực vật và hiệu quả cộng hưởng của chúng. Bên cạnh đó, chúng tôi loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng hóa chất để chiết xuất các hoạt chất từ thực vật, mang đến những sản phẩm có hàm lượng hoạt chất cao nhất.

Đây chính là sự liên kết giữa các sản phẩm của chúng tôi với bài kiểm tra qTest độc đáo - hành trình nghiên cứu không ngừng về sự cân bằng bên trong bạn.



qTest của riêng bạn

Bạn có thể thực hiện qTest ngay tại nhà! Chỉ cần để công cụ xét nghiệm xác định vị trí kết quả của bạn trên qMatrix sau khi hoàn thành Giai đoạn A và B



Hướng dẫn sử dụng

Giai đoạn A: Xét nghiệm Redox

1. Giữ miếng bông gòn trong miệng và di chuyển nhẹ nhàng như đang nhai trong khoảng một phút.
2. Dùng nhíp được cung cấp, kẹp chặt miếng bông gòn và ép vào thành trong của lọ thủy tinh để chiết xuất nước bọt vào ống nhựa.
3. Gắn đầu hút mới vào ống nhỏ giọt và hút thuốc thử R2 từ lọ thủy tinh.
4. Lấy ống nghiệm chứa R1 và nhỏ thuốc thử từ ống nhỏ giọt vào.
5. Thay đầu hút mới cho ống nhỏ giọt.
6. Gắn đầu hút mới vào ống nhỏ giọt và hút nước bọt từ ống nhựa.
7. Nhỏ nước bọt đã hút vào ống nghiệm.
8. Đậy nắp ống nghiệm và lắc nhẹ theo chiều lật ngược trong 10 giây.
9. Sau hai phút, đối chiếu màu sắc trong ống nghiệm với bảng màu in bên dưới (từ đỏ đậm nhất đến trắng).


Giai đoạn B: Xét nghiệm pH

Thấm đầu que thử pH vào nước bọt trong ống nhựa cho đến khi ướt đều. Đợi 5 giây, rồi đối chiếu với màu giống nhất trên bảng màu.

Giai đoạn C


Sử dụng bảng màu theo vùng được cung cấp trong sách hướng dẫn bên trong hộp. Tại ô giao nhau giữa kết quả đo pH và kết quả đo Redox, hãy đánh dấu giá trị pH (trục hoành) và giá trị Redox (trục tung).

Vùng hiển thị kết quả

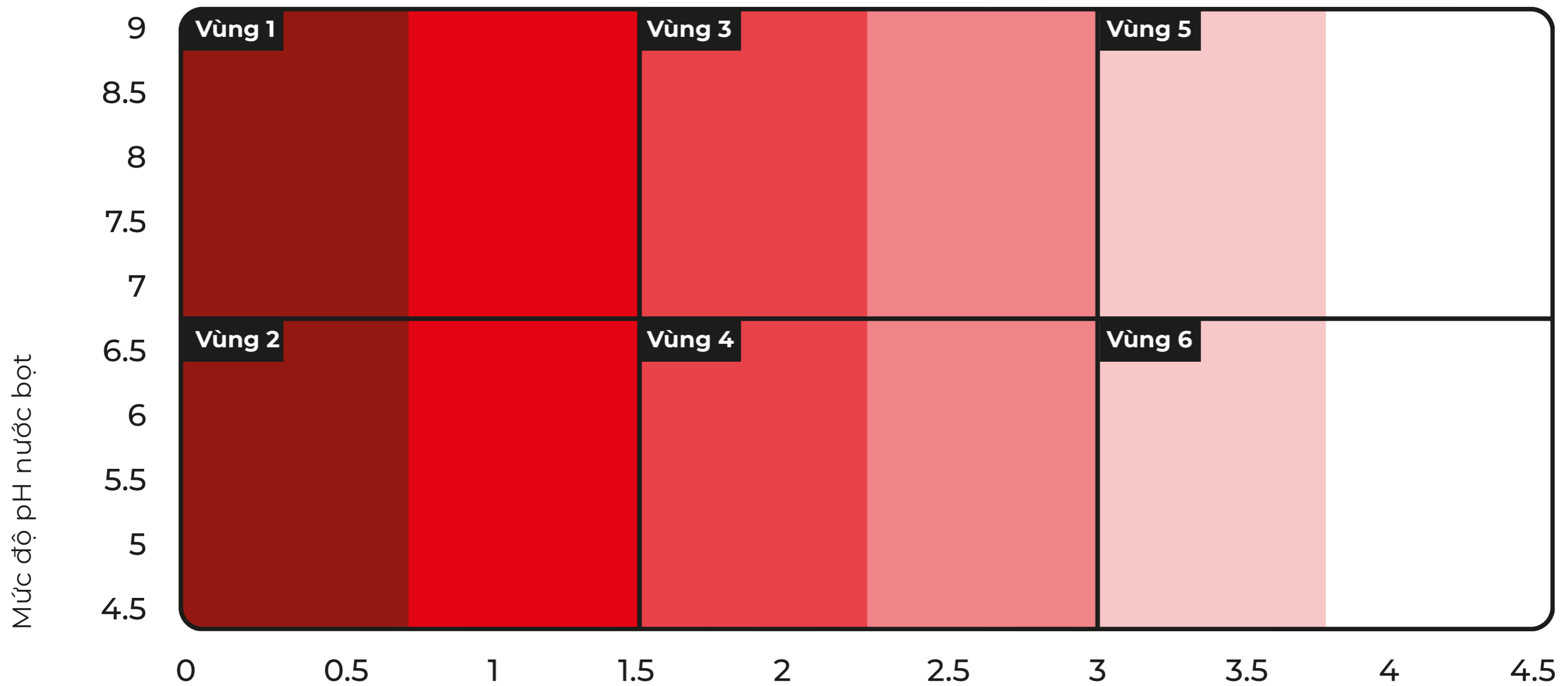

Màu sắc biểu thị Redox
Chỉ số chống oxy hóa
của nước bọt

Các hoạt chất cần thiết
theo mỗi vùng kết quả

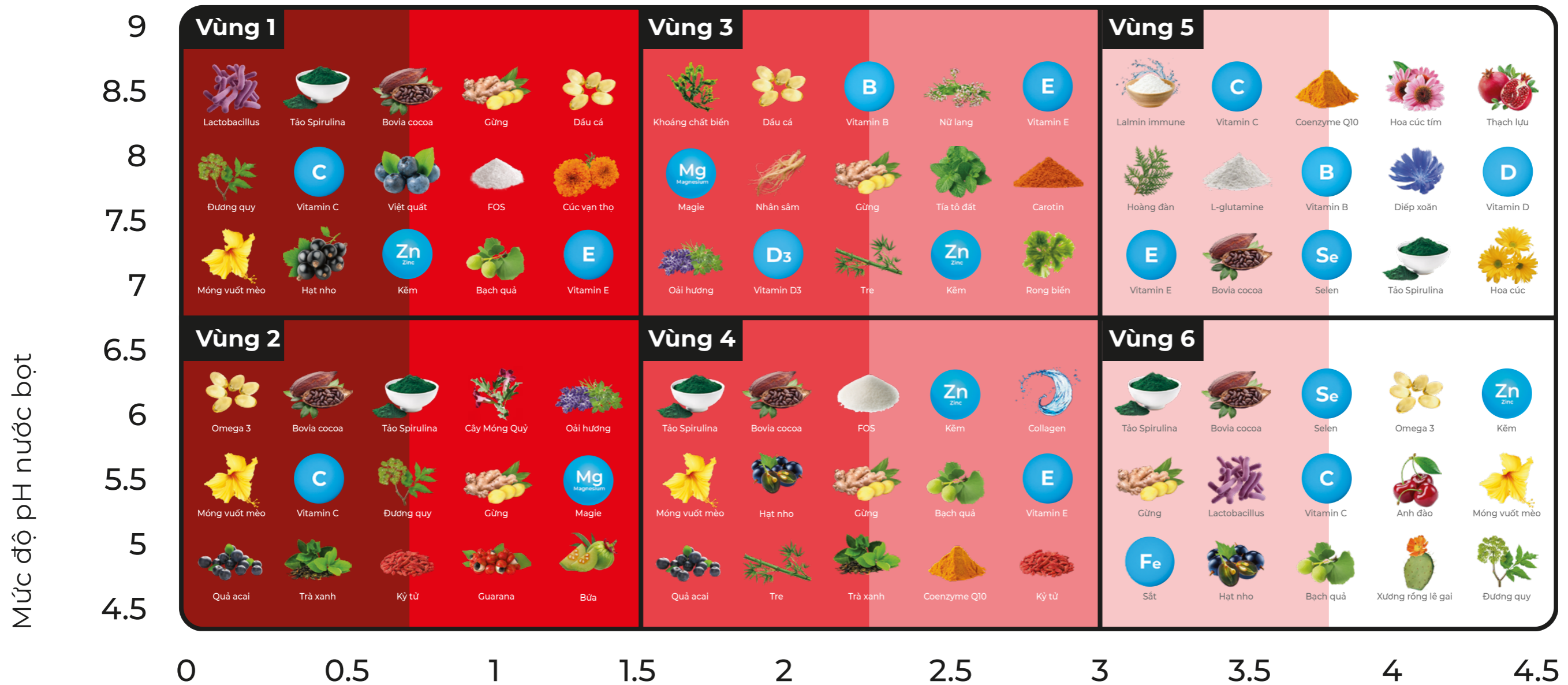

Màu sắc biểu thị Redox
Chỉ số chống oxy hóa
của nước bọt



I + G

Cách sử dụng hoạt chất tăng cường đa năng

Theo Giáo sư Lotti, kết quả nghiên cứu về thành phần sản phẩm của Project V cho thấy nên sử dụng các hoạt chất tăng cường tự nhiên. **Chúng có tác dụng tạo môi trường trung hòa stress oxy hóa và phục hồi cân bằng axit-bazơ trong cơ thể.**

Sự kết hợp giữa công nghệ khoa học tiên tiến và kinh nghiệm lâu năm của Project V đã giúp tạo nên công thức đột phá, dựa trên sức mạnh cộng hưởng từ sản phẩm I và G độc quyền của chúng tôi.

G là sự kết hợp của gừng và bạch sâm Hoàng Đế, một loại thảo dược chứa các chất thích nghi tự nhiên giúp hỗ trợ tất cả các hệ thống cơ quan trong cơ thể và duy trì mức độ oxy hóa cân bằng.

I là sản phẩm kích hoạt dưỡng chất độc đáo, kết hợp bột cacao bổ dưỡng (Bovia), tảo Spirulina hữu cơ và Omega-3. Sản phẩm được thiết kế để tăng cường hiệu quả của các thành phần tự nhiên có trong các dòng sản phẩm khác của Project V.

Giáo sư Lotti khuyên dùng bộ sản phẩm này với các sản phẩm khác của Project V để có tác dụng nhanh. Nhờ các thành phần đặc biệt, việc kết hợp này sẽ giúp cân bằng pH và cải thiện sức khỏe toàn diện.

G | Tăng cường sức khỏe

Kích thích quá trình tái cân bằng và chữa lành tự nhiên của cơ thể. Đây là một chất chống oxy hóa và thích nghi tự nhiên với tác dụng rộng rãi.

- Tăng cường khả năng tư duy
- Thúc đẩy quá trình trao đổi chất
- Kích thích tổng hợp axit amin và protein
- Điều hòa huyết áp
- Ngăn ngừa tích tụ cholesterol

Mỗi ngày uống 1 viên vào buổi sáng. Sau khi xét nghiệm lại, tùy thuộc vào kết quả, có thể tăng liều dùng.



I | Năng lượng classic


Chống lại các gốc tự do gây hại, thúc đẩy tái tạo tế bào, tăng cường hấp thu dưỡng chất và hỗ trợ tiêu hóa.

- Kích thích sản xuất serotonin
- Cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng ở đường ruột và tế bào.
- Giúp cải thiện lưu thông máu đến mô da
- Nâng cao hệ miễn dịch
- Giảm nguy cơ mắc các bệnh về hệ thần kinh

Mỗi ngày uống 1 viên vào buổi sáng. Sau khi xét nghiệm lại, tùy thuộc vào kết quả, có thể tăng liều dùng



Sản phẩm Project V được đề xuất theo mỗi vùng kết quả

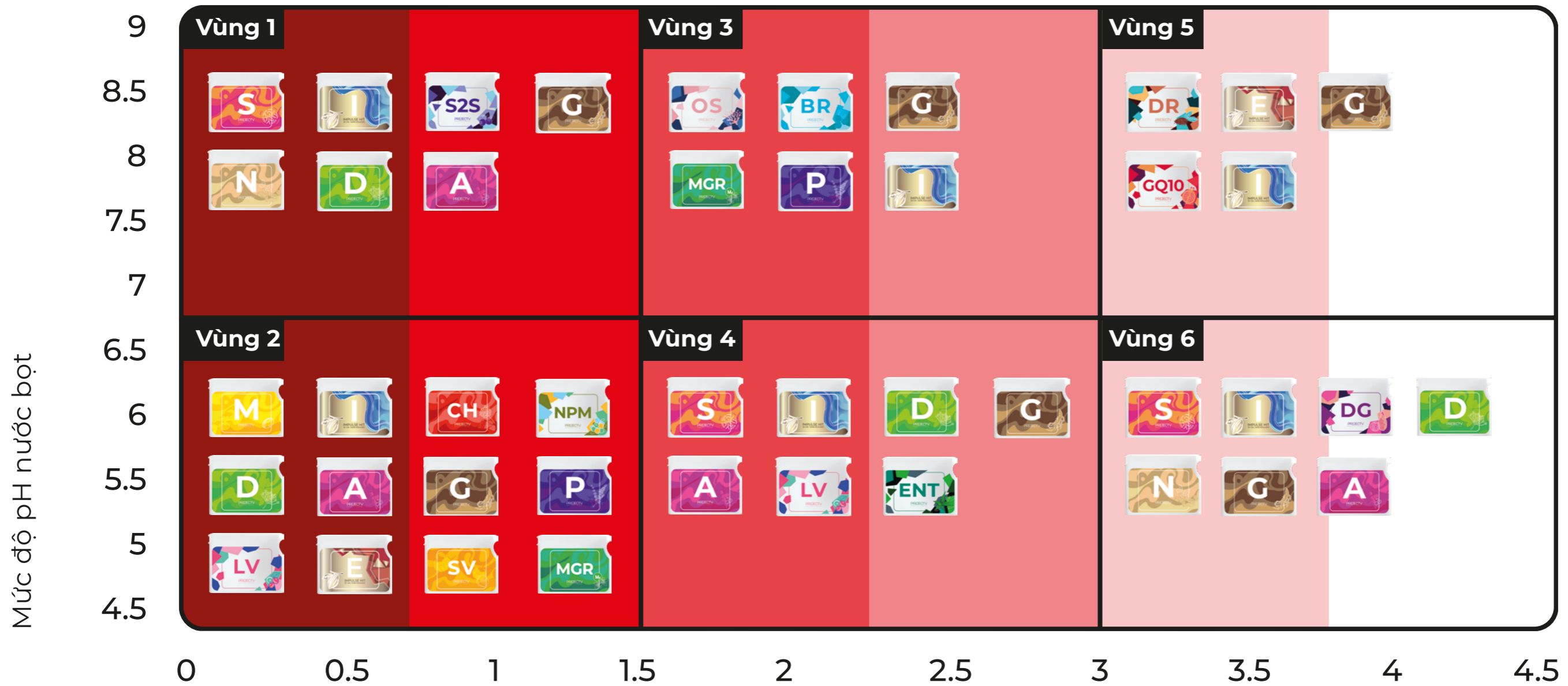


Màu sắc biểu thị Redox
Chỉ số chống oxy hóa
của nước bọt

Vùng 3 | ReDox - từ 1.5 đến 3.5 | pH = từ 7.0 đến 9.0



Kết quả qTest của bạn cho thấy **độ pH cao (mức axit trong phạm vi cho phép) và mức cân bằng REDOX trung bình**. Để đưa quá trình trao đổi chất về trạng thái bình thường, phục hồi độ pH và cân bằng REDOX, cần loại bỏ các chất ô nhiễm và độc tố ra khỏi cơ thể, tăng cường khả năng chống oxy hóa và cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu. Để đạt được mục tiêu này, lối sống lành mạnh cùng sản phẩm I+G được bào chế đặc biệt với công thức thành phần tiên tiến, kết hợp với các sản phẩm khác của Project V, có thể hỗ trợ tối ưu cho việc đạt được những mục tiêu này. Để theo dõi hiệu quả, nên lặp lại kiểm tra qTest hàng tháng trong suốt 6 tháng.

**Những ai có bệnh nặng và triệu chứng phức tạp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng.*

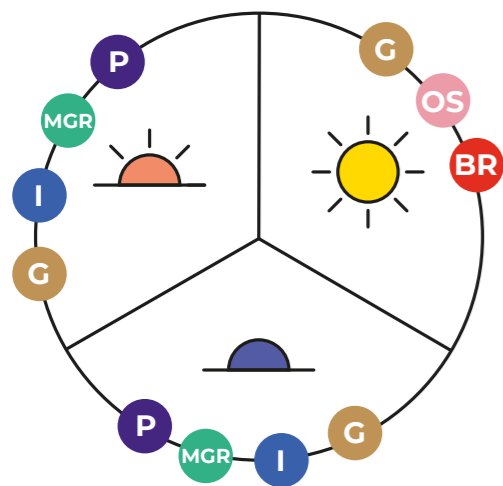

Các kết hợp từ Bảng chữ cái Project V



OS – Canxi và vitamin D giúp giảm mất mật độ xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Mật độ xương thấp là yếu tố nguy cơ gây gãy xương do loãng xương

BR – Bạch quả giúp phòng chống suy giảm nhận thức và cải thiện khả năng định hướng trong không gian

MGR – Magie bisglycinate giúp tăng cường hấp thu magie, cải thiện tình trạng mệt mỏi kéo dài

P – Tía tô đất có tác dụng kháng virus và an thần, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ

Nguy cơ mắc các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng ở những vùng này là thấp. Nên sử dụng các chất chống oxy hóa dạng Adaptogen với liều lượng trung bình/cao trong ba tháng. Sau ba tháng, cần lặp lại việc xét nghiệm nước bọt để theo dõi tình trạng.


Điều chỉnh lối sống, sử dụng các chất chống oxy hóa phù hợp và điều hòa REDOX bằng các sản phẩm của Project V là những cách hiệu quả nhất để bắt đầu quá trình chống lão hóa và sống khỏe mạnh.

Vùng 4 | ReDox - từ 1.5 đến 3.0 | pH = từ 4.5 đến 7.0



Kết quả qTest của bạn cho thấy **độ pH thấp (mức axit trong phạm vi cho phép) và mức cân bằng REDOX trung bình**. Để đưa quá trình trao đổi chất về trạng thái bình thường, phục hồi độ pH và cân bằng REDOX, cần loại bỏ các chất ô nhiễm và độc tố ra khỏi cơ thể, tăng cường khả năng chống oxy hóa và cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu. Để đạt được mục tiêu này, lối sống lành mạnh cùng sản phẩm I+G được bào chế đặc biệt với công thức thành phần tiên tiến, kết hợp với các sản phẩm khác của Project V, có thể hỗ trợ tối ưu cho việc đạt được những mục tiêu này. Để theo dõi hiệu quả, nên lặp lại kiểm tra qTest hàng tháng trong suốt 6 tháng.

**Những ai có bệnh nặng và triệu chứng phức tạp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng.*

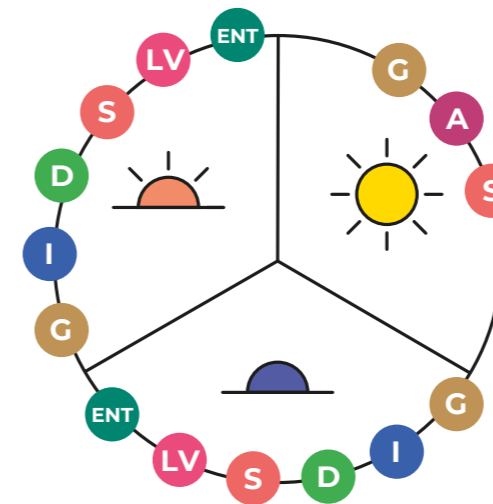

Các kết hợp từ Bảng chữ cái Project V



S – Chất xơ tự nhiên Fructooligosaccharide ngăn ngừa kích ứng đường ruột, chống rối loạn vi sinh vật đường ruột và hỗ trợ điều tiết đường huyết

D – Móng vuốt mèo hỗ trợ đào thải các sản phẩm độc hại từ quá trình trao đổi chất

A – Bạch quả điều hòa tuần hoàn máu, tăng cường oxy cho máu

LV – Chiết xuất quả acai trung hòa các gốc tự do có hại và làm chậm quá trình lão hóa

ENT – Methylsulfonylmethane (MSM) là một chất chứa lưu huỳnh hữu cơ, có khả năng kích thích sản sinh dịch khớp, giúp giảm đau và giảm viêm khớp

Nguy cơ mắc các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng ở những vùng này là thấp. Nên sử dụng các chất chống oxy hóa dạng Adaptogen với liều lượng trung bình/cao trong ba tháng. Sau ba tháng, cần lặp lại việc xét nghiệm nước bọt để theo dõi tình trạng. Chỉ những đối tượng thuộc Khu vực 4 mới cần sử dụng các chất thích nghi giúp tăng cường kiểm soát.


Điều chỉnh lối sống, sử dụng các chất chống oxy hóa phù hợp và điều hòa REDOX bằng các sản phẩm của Project V là những cách hiệu quả nhất để bắt đầu quá trình chống lão hóa và sống khỏe mạnh.

Vùng 5 | ReDox – từ 3.0 đến 4.5 | pH = từ 7.0 đến 9.0




Kết quả qTest của bạn cho thấy **độ pH cao (mức axit trong phạm vi cho phép) và mức cân bằng REDOX bình thường**. Để đưa quá trình trao đổi chất về trạng thái bình thường, phục hồi độ pH và cân bằng REDOX, cần loại bỏ các chất ô nhiễm và độc tố ra khỏi cơ thể, tăng cường khả năng chống oxy hóa và cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu. Để đạt được mục tiêu này, lối sống lành mạnh cùng sản phẩm I+G được bào chế đặc biệt với công thức thành phần tiên tiến, kết hợp với các sản phẩm khác của Project V, có thể hỗ trợ tối ưu cho việc đạt được những mục tiêu này. Để theo dõi hiệu quả, nên lặp lại kiểm tra qTest hàng tháng trong suốt 6 tháng.

**Những ai có bệnh nặng và triệu chứng phức tạp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng.*

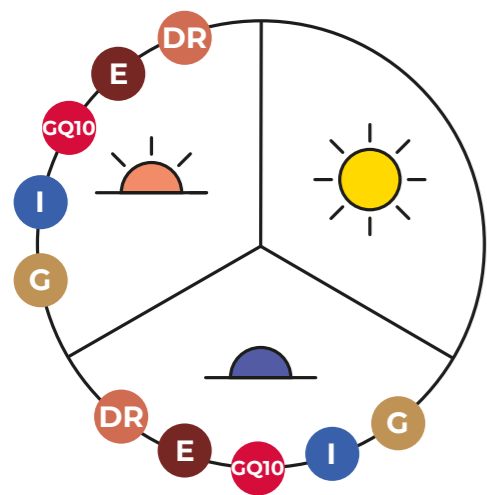

Các kết hợp từ Bảng chữ cái Project V

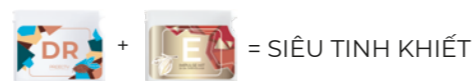

DR – Lalmin® Immunie là sản phẩm từ men vi sinh lên men, được bào chế theo công thức đặc biệt. Sản phẩm này giúp bảo vệ cơ thể nhờ vào các đặc tính hỗ trợ miễn dịch và chống oxy hóa

E – Tảo Spirulina giàu vitamin (A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, E, biotin) và các khoáng chất vi lượng. Giúp tạo cảm giác no và cân bằng, giảm căng thẳng, đồng thời có tác dụng bổ sung năng lượng, nâng cao miễn dịch và chống oxy hóa

GQ10 – Coenzyme Q10 đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, từ đó giúp làm chậm lão hóa tế bào

Người dùng trong các khu vực này cần áp dụng chế độ ăn nhẹ với các chất chống oxy hóa dạng Adaptogen. Xét nghiệm nước bọt cần được thực hiện 20 tuần một lần cho đến khi các chỉ số trở về bình thường. Người dùng ở Vùng 5 không cần sử dụng chất kích thích kiềm.


Điều chỉnh lối sống, sử dụng các chất chống oxy hóa phù hợp và điều hòa REDOX bằng các sản phẩm của Project V là những cách hiệu quả nhất để bắt đầu quá trình chống lão hóa và sống khỏe mạnh.

Vùng 6 | ReDox – từ 3.0 đến 4.5 | pH = từ 4.5 đến 7.0




Kết quả qTest của bạn cho thấy **độ pH thấp (mức axit trong phạm vi cho phép) và mức cân bằng REDOX bình thường**. Để đưa quá trình trao đổi chất về trạng thái bình thường, phục hồi độ pH và cân bằng REDOX, cần loại bỏ các chất ô nhiễm và độc tố ra khỏi cơ thể, tăng cường khả năng chống oxy hóa và cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu. Để đạt được mục tiêu này, lối sống lành mạnh cùng sản phẩm I+G được bào chế đặc biệt với công thức thành phần tiên tiến, kết hợp với các sản phẩm khác của Project V, có thể hỗ trợ tối ưu cho việc đạt được những mục tiêu này. Để theo dõi hiệu quả, nên lặp lại kiểm tra qTest hàng tháng trong suốt 6 tháng.

**Những ai có bệnh nặng và triệu chứng phức tạp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng.*

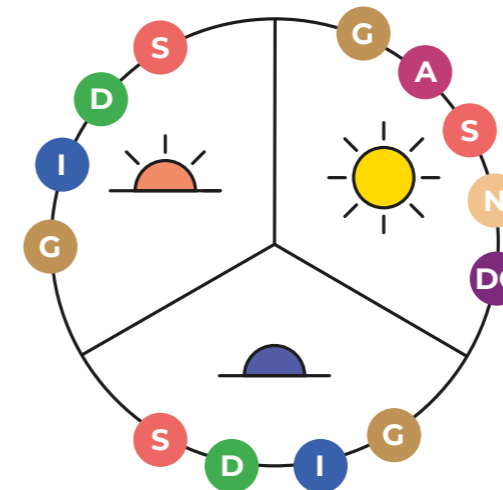

Các kết hợp từ Bảng chữ cái Project V

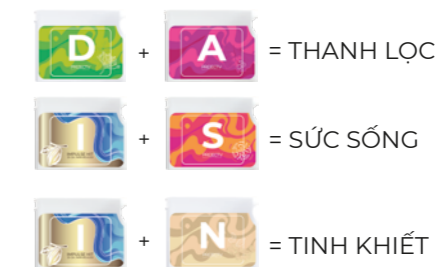

S – Chất xơ tự nhiên Fructooligosaccharide ngăn ngừa kích ứng đường ruột, chống rối loạn vi sinh vật đường ruột và hỗ trợ điều tiết đường huyết

DG – Tảo Chlorella giúp duy trì hoạt động bình thường của đại tràng, hỗ trợ sức khỏe và năng lượng cho cơ thể, đồng thời đẩy nhanh quá trình tiêu hóa

N – Đương quy có tác dụng bổ sung sức khỏe và lợi tiểu

D – Móng vuốt mèo hỗ trợ đào thải các sản phẩm độc hại từ quá trình trao đổi chất

A – Bạch quả điều hòa tuần hoàn máu, tăng cường oxy cho máu

Người dùng trong các khu vực này cần áp dụng chế độ ăn nhẹ với các chất chống oxy hóa dạng Adaptogen. Xét nghiệm nước bọt cần được thực hiện 20 tuần một lần cho đến khi các chỉ số trở về bình thường. Người dùng Vùng 6 cần uống Adaptogen hỗ trợ kiềm hóa liên tục cho đến khi xét nghiệm nước bọt cho thấy chỉ số này đã ổn định.

Điều chỉnh lối sống, sử dụng các chất chống oxy hóa phù hợp và điều hòa REDOX bằng các sản phẩm của Project V là những cách hiệu quả nhất để bắt đầu quá trình chống lão hóa và sống khỏe mạnh.

Lời kết

Chúng tôi tự hào khi được giới thiệu bộ xét nghiệm nước bọt pH-REDOX đầu tiên, giúp chuyển đổi kết quả thành giải pháp tức thời dựa trên những tác dụng đã được chứng minh của các adaptogen.

Chiến lược chống lão hóa và duy trì tuổi thọ khỏe mạnh của chúng tôi dựa trên dữ liệu và giả thuyết được cộng đồng khoa học toàn cầu công nhận.

Chúng tôi không khuyên bỏ qua các biện pháp phòng ngừa của hệ thống y tế quốc gia. Thay vào đó, chúng tôi cung cấp một phương pháp phân tích hiệu quả cao giúp xác định sự bất thường về các chỉ số quan trọng trong cơ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi còn mang đến một liệu trình chăm sóc sức khỏe cải tiến và chiến lược chống lão hóa dựa trên các chất adaptogen tự nhiên - đây là chiến lược được kiểm chứng khoa học đầu tiên.

Một lần nữa, Project V giao tiếp bằng ngôn ngữ của sự trường thọ thông qua Bảng chữ cái V, mở ra cánh cửa đến với tuổi thọ viên mãn thông qua những sản phẩm thương hiệu uy tín.



Sự ra đời của phương pháp xét nghiệm tại nhà đã mang đến một bước ngoặt trong việc tiếp cận và thực hiện các chẩn đoán y tế một cách thuận tiện. Giờ đây, bệnh nhân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe ngay tại nhà, giảm thiểu thời gian chờ đợi và hạn chế cảm giác lo lắng thường gặp khi đến phòng khám



QTEST KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CHẨN ĐOÁN BỆNH, KHÔNG THAY THẾ CHẨN ĐOÁN Y KHOA. KẾT QUẢ QTEST CHỈ LÀ NHỮNG DẤU HIỆU VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ qua
welcome@qtest.pro

